

BACTICID AF



Ātrās dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes

Izmantošana

Dezinfekcijas līdzeklis alkohola izturīgu virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai

Raksturojums

BACTICID AF ir alkoholu saturošs, šķidrums dezinfekcijas līdzeklis alkoholu izturīgām virsmām un neinvazīvām medicīnas ierīcēm. Gatavs lietošanai. Nesatur aldehīdus, smaržvielas un krāsvielas.

BACTICID AF piemīt plašas fungicīdas un baktericīdas īpašības, tas iznīcina mikroorganismus, sēnītes un vīrusus, tsk. MRSA, VRE, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Vaccinia u.c.

Pamatlietošanas veids/-i

BACTICID AF lieto ātrai virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. Piemērots lietošanai uz visām, izņemot akrila, mitrumizturīgajām virsmām (medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, sienām u.tml.).

Papildus lietošanas veids/-i

BACTICID AF lieto arī ātrai virsmu dezinfekcijai izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām, tsk., pārtikas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, kafējnīcās u.c. – virsmu, galdu, ledusskapju, vitrīnu, svaru un iekārtu dezinfekcijai; pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādēs – visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai; frizētavās, kosmētiskajos salonos – kosmētisko krēslu, galdiņu, kosmētiskā inventāra u.c. virsmu dezinfekcija; citur - visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai

Lietošana

Preparātu uzklāj vai izsmidzina vienmērīgi nokļājot visu dezinficējamo virsmu. **Gatavs lietošanai.** Iedarbības laiks laiks **30 sek.**

Aktīvās vielas

100 g satur: Etanols 57 g, propān-2-ols 6 g.

Darba drošības un pirmās palīdzības norādījumi

Pirms lietošanas lasiet produkta etiķeti un vajadzības gadījumā anotāciju un drošības datu lapu.

Vispārējie drošības noteikumi: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem

Darba drošības noteikumi: skatīt drošības datu lapas 7.sadaļu

Uzglabāšana: glabāt sausās telpās, temperatūrā – 5-30°C.

Drošības prasības: skatīt drošības datu lapas 8.2.sadaļu.

Pirmās palīdzības pasākumi:

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku produktu vai izjutot nemītīgu diskomfortu. Uzrādiet ārstam šī produkta drošības datu lapu.

Pēc ieelpošanas: Šis produkts nav klasificēts kā ieelpošanai bīstams. Tomēr gadījumā, ja parādās saindēšanās simptomi, ir ieteicams aizvest cietušo no riska zonas, nodrošinot viņam / viņai svaigu gaisu un atpūtu. Ja simptomi saglabājas, vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu: Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskarē ar ādu. Ja saskare ar ādu ir notikusi, ir ieteicams novilkt piesārņoto apģērbu un apavus, noskalot ādu vai nepieciešamības gadījumā rūpīgi nomazgāt cietušo ar aukstu ūdeni un neitrālām ziepēm. Smagas reakcijas gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Pēc saskares ar acīm: Rūpīgi vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar ūdeni. Ja cietušais lieto kontaktlēcas, tās ir jāizņem, ja vien tās nav pielipušas pie acīm, jo tas var radīt papildu bojājumus. Visos gadījumos pēc tīrīšanas ir nekavējoties jādodas pie ārsta, ņemot līdzi produkta Drošības datu lapu.

Pēc norīšanas: Norīšanas gadījumā nekavējoties dodieties pie ārsta un uzrādiet šī produkta Drošības datu lapu.

Paplašināti - skatīt produkta drošības datu lapu.

Citi ierobežojumi

Produkts paredzēts tikai profesionālai izmantošanai!

Piezīmes

BACTICID AF atbilst likumdošanas prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Satur biocīdu! Ievērot līdzekļa derīguma termiņu (skat. uz iepakojuma). Biocīda inventarizācijas numurs LV31 052018/4484 (2.,4. produkta lietošanas veids). Utilizācija: iepakojums - izskalotu iepakojumu nodod pārstrādei.

Iepakojumi

500ml ar smidzinātāju

1000ml ar smidzinātāju

5L



Ražotājs

A/S CHEMI-PHARM, Pollu 132, 10917, Tallina, Igaunija

Izplatītājs Latvijas Republikā:

SIA CHEMI PHARM GROUP

Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058

Tel. +371 66010634, Fakss +371 66010635

e-mail: office@chemi-pharm.com

www.chemi-pharm.com
