

BACTICID

ALKOHOLI BAASIL KIIRDESINFEKTSIOONIVAHEND MEDITSIIINISEADMETELE

BACTICID on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate pindade kiirdesinfektsiooniks. Valmislahusena, on seda mugav kasutada. Meditsiiniseadmete desinfectsiooni tuleb teha regulaarselt vastavalt desinfectsiooniplaanile peale iga patsiendi visiiti.



Tootes BACTICID on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete allergeoside teket. BACTICID on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram- negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid, sh. tuberkuloosi tekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriset viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).

KASUTAMINE:

BACTICID on efektiivne vahend meditsiiniseadmete nagu operatsioonilauad, kandraamid, patsienditoolid, haigla- ja sünnitusvoodid, ratastoolid jne kiireks desinfectsiooniks kõrgendatud hügieeni- nõuete tingimustes, kus desinfectseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks.

BACTICID'i on valmislahus ja ei vaja lahjendamist. Ei sobi kasutamiseks akrüülklaasile ja alkohol- lahustu- vale lakile. Kui ei teata pinnakatte taluvust alkoholile, võib seda proovida pinna silmatorkamatus kohas.

Ei vaja mahapesemist. Ei muuda pindade visuaalset väljanägemist. Võib kasutada ka toiduga kokku- puutuvate pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode sobib kasutamiseks järgnevatel pinnakattematerjalidel: metallid- roostevaba teras, alumiinium, vask ja messing; põrandakattematerjalid - PVC, linoleum ja keraamilised plaadid ja plastikud, klaaspinnad.

BACTICID kantakse meditsiiniseadmete pindadele niisutatud lapi või paberiga. Pind peab jääma nähtavalt niiskeks.

Toimeaeg 30 sek

Kui pinnal on nähtavat eritist, eemaldada see esmalt puhastusainega, pind kuivatada ning desinfitseerida Bactacidiga.

MIKROBIOLOOGIA:

Mikroorganism	Kontsentratsioon	Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30 sek.
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek.
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrae	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium avium	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Aspergillus Niger	lahjendamata	5 min
Aspergillus brasiliensis	lahjendamata	60 sec.
HBV/HCV, HIV	lahjendamata	30 sek
Adenoviirused	lahjendamata	30 sek
Herpes simplex	lahjendamata	30 sek.
Rota	lahjendamata	30 sek
Vaccina	lahjendamata	30 sek
BVDV	lahjendamata	30 sek
(surrogaarviirus HCV määramiseks)		

Et BACTICID on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat) ja vaccinia viirustele, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viirusi. Nende katsetuste põhjal võib väita, et BACTICID on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus). Vastavalt nendele testidele kinnitame, et ka Bactacid toimib läbi vere levivate viiruste vastu (nagu HBV, HCV and HIV, lisaks Herpes viirused).

Toode vastab **EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 1276, EN 14348, EN 13624, EN13697, EN 1650, EN 14476** nõuetele.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Vahend on väga tuleohtlik. Hoida eemale süttimisallikast - Mitte suitsetada!

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada ettevaatlikult mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.



KOOSTIS:


100g toodet sisaldab: etanool 72 g, Alküül (C12-18) dimetüülbensüülammonium kloriid (ADBAC (C12-18)) 0,0125g, etüülbensüülammonium kloriid (ADEBAC (C12-C14)) 0,0125 g

Tootepakend on ümbertöödeldav.

Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile



PAKENDID:

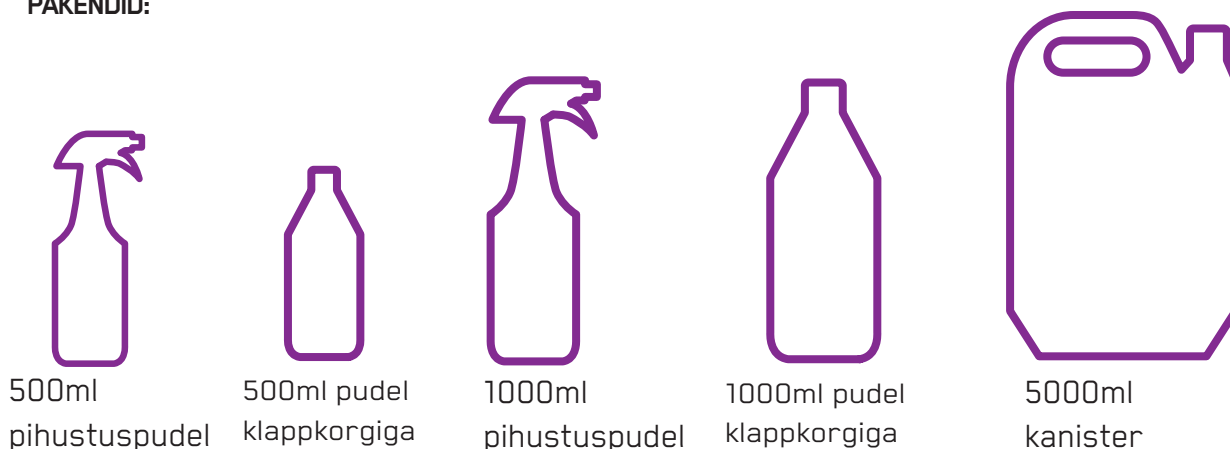

500ml
pihustuspudel

500ml pudel
klappkorgiga

1000ml
pihustuspudel

1000ml pudel
klappkorgiga

5000ml
kanister



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com