

CHEMIPHARM DES NEW (MD)

DESINFITSEERIVA TOIMEGA ÜLDPUHASTUSVAHEND

Chemipharm Des New MD

MDR Desinfektsioonivahend mitteinvasiivsetele meditsiinilistele pindadele. Kutsealaseks kasutamiseks.

Chemipharm Des New

BPR Kontsentreeritud biotsiidne toode veekindlate pindade desinfitseerimiseks ja puhastamiseks (tooteliik 2 ja 4). Kutsealaseks kasutamiseks meditsiini-, toiduaine- ja tööstusvaldkonnas ning ametkondlikel aladel. Biotsiidi registreerimistunnistuse nr. 0037/05.

KASUTAMINE



Doseeri mopile või rätikule, et see oleks niisutatud.



Pühi ja niisuta kogu pind.



Pinnad peavad olema niisutatud terve kontaktaja vältel.

Tootekirjeldus

Chemipharm Des New (MD) on lõhnata, fosfaadivaba vedel aluseline kontsentratsioon pindade pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Tootes kasutatakse erinevaid kvaternaarseid ammoonimühendeid, mis muudavad ta laia toime spektriliseks, toimides ka nendesse bakteritesse, mis tavaliste desinfektsioonivahendite suhtes muutuvad kiiresti resistentseteks. Arvestades üldtoodud ei vaja Chemipharm Des New (MD) ümbervahetamist mõne aja möödudes, nagu tavaliste desinfektsioonivahendite puhul soovitatakse.

Chemipharm Des New (MD) on laia pärmseente vastase ja bakteritsiidse toimega, inaktiveerib ümbrisega viirusi HBV, HCV; HIV).

Pindaktiivsete ainete sisalduse tõttu on tootel head puhastavad omadused.

Toote tõhusus töölause valmistamisel

Chemipharm Des New (MD) on vedel kontsentratsioon. Töölause valmistamisel juhindu allolevast tabelist. Valmistage töölause toatemperatuuril ning kandke seda lapi või mopiga piisavas koguses pinnale. Veenduge, et pinnad on märjad kogu toimeaja jooksul

VÄIDE	LAHUSE KONTS.	TOODET*	VETT	KONTAKT-AEG
Bakteritsiidne/pärmseente vastane EN 13727 / EN 13624	1%	10 ml	990 ml	5 min
	0.3%	3 ml	997 ml	10 min
Virutsiidne EN 14476 (MVA)	1%	10 ml	990 ml	30 min

*NÄIDE: 1L TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE.

LEHT 1/2 CHEMI-PHARM CHEMIPHARM DES NEW (MD) TOOTELEHT



CE
0537

- ▲ Puhastab ja desinfitseerib
- ▲ Laiaspektriline kaitse resistentsete patogeene eest
- ▲ Hea materjalisobivus
- ▲ Kuivab ilma jälgi jätmata

KOOSTIS

100 g toodet sisaldab toimeaineid: C12-18 alküüldimetüülensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12-18)) (CAS: 68391-01-5) 3,5 g; C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)) (CAS: 85409-23-0) 3,5 g.


SÄILITUS

P405:Hoida lukustatult.

Toode säilib 12 kuud pärast avamist.

KASUTUSJÄRGNE KÄITLUS

P501: Hävitage sisu/pakendid vastavalt kehtivatele jäätmekäitluse nõuetele. Täielikult tühjad pakendid on taaskasutatavad nagu iga teine pakend.

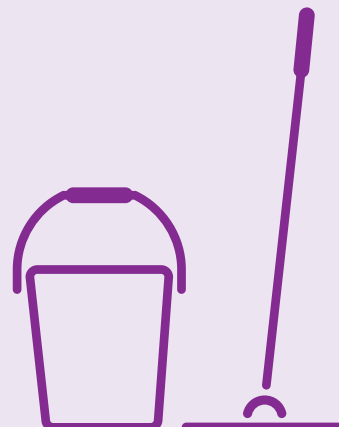

Kasutamine

Üldpinnad ja kõva mööbel: Töödelda mopi, lapi või pihustiga. Pinnad peavad jääma nähtavalt märjaks. Loputamine ei ole vajalik.

Pehme mööbel ja väikesemed: Hõõruda üle töölahuses niisutatud käsna või lapiga.

Mänguasjad ja toiduga kokkupuutuvad pinnad: Pärast toimeaja lõppu loputada puhta veega

Toiduainetööstuse desomatid: Kasutada 1% lahust. Intensiivsel kasutusel vahetada lahust iga päev, vähesel kasutusel 1–2 korda nädalas.

Pärast toimeaega tuleb kõik toiduga kokkupuutuvad pinnad põhjalikult loputada puhta joogiveega.

Valmistatud lahuse säilivusaeg suletud anumas on 14 päeva, kasutuses olev lahus säilib 24 tundi. Vahetage lahus välja kohe, kui see on nähtavalt saastunud. Järgige asutusesiseseid juhiseid, s.h. desinfitseerimisplaani (kasutusintervall ja perioodiline loputamine). Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuge ohutusnõuetega!

Pakendi suurused

TOOTEID KASTIS	TOODE
8 / 12	1 L klappkork
3	5 L kanister



HOIATUSED

ETTEVAATUST: Aquatic Chronic 1: H410
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Skin Corr. 1: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P280: Kanda kaitsekindaid. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. P321: Vajalik on kiire eriravi (pöörduge arsti poole koos selle toote ohutuskardiga).

VASTUNÄIDUSTUSED: Ärge kasutage koos aldehydide sisaldavate preparaatidega. Hoida lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage niiskustundlikel pindadel. Ei ole ette nähtud invasiivsete meditsiiniseadmete leotamiseks, kõrgtasemeliseks desinfitseerimiseks ega steriliseerimiseks.

Ärge kasutage paber- või tselluloosrätikutega (see vähendab tõhusust). Järgige alati seadme tootjapoolseid puhastus- ja desinfitseerimisjuhiseid. Kui pinnataluvus on teadmata, testige toodet esmalt märkamatuks jääval alal.

ESMAABIMEETMED

Kokkupuute korral, kui ilmnevad sümptomid, pöörduge mürgistuskeskuse või arsti poole ja esitage toote ohutuskart (SDS). See toode ei ole ohtlik sissehingamisel. Kui ilmnevad sümptomid, viige inimene värske õhu kätte.

NAHAL: Peske nahka kohe rohke veega. Seejärel eemaldage kõik saastunud riided ja peske need enne uuesti kasutamist. Loputage vähemalt 15 minutit.

SILMA SATTUMISEL: Loputada leige veega vähemalt 15 minutit, hoides silmad avatuna. Kontaktläätsed eemaldada, kui see on kergesti võimalik. Vältida silmade hõõrumist.

ALLANEELAMISEL: Loputada suu ja kurk. Mitte esile kutsuda oksendamist. Tagada puhkus ja koheselt pöörduda arsti poole. Teadvusetule isikule mitte anda midagi suhu. Kõik tõsised selle meditsiiniseadmega seotud juhtumid tuleb teatada tootjale ja pädevatele asutustele. Mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 (E-P 24h).



Chemi-Pharm AS
Tänassilma tee 11, Tänassilma küla, Saku vald 76406, Eesti
Reg. nr 10140819
tel: +372 6778806
e-mail: chemi-pharm@chemi-pharm.com
chemi-pharm.com

Chemi-Pharm AS rakendab oma tegevuses rahvusvahelisi standardeid, sealhulgas EN ISO 9001, EN ISO 14001 ja EN ISO 13485, vastavalt nende kohaldamisalale

